



Istruzioni per la Raccolta dei Campioni per il Test del Sesso nei Bambini


Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni. Una mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe avere delle ripercussioni sulla validità del campione o dei risultati.

Controllare i Moduli

1. Verificate che l'età gestazionale sia registrata e sia superiore alle 10 settimane alla data di raccolta.
2. Verificate che la paziente abbia letto le informazioni sul consenso e abbia firmato il modulo di richiesta.

Raccogliere i(l) Campione(i)

1. Non è necessario che la paziente digiuni prima di eseguire il prelievo di sangue richiesto. **È importante che non sia presente alcun individuo di sesso maschile durante la raccolta di questi campioni.**
2. Riempite la provetta Streck fornita con 7-10 ml di sangue. **La raccolta deve partire da un minimo di 7 ml.**
3. **Fate immediatamente la miscela nella provetta capovolgendola delicatamente più volte:**

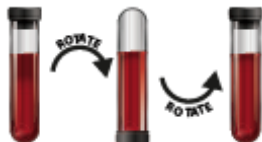

4. Compilate l'etichetta sulla provetta con i dettagli della paziente inserendo nome completo e data di nascita, in formato **GG/MM/AAAA**.
5. Segnate e inserite la data del prelievo del sangue sul modulo di raccolta del campione. **Tutti i campioni di sangue devono essere raccolti da una persona qualificata.**

Imballare i(l) Campione(i)

1. Rimettete il Tubetto per il Sangue nella busta assorbente e nella busta con involucro a bolle fornita nel kit. Posizionate il tubetto protetto nella sacca anticontaminazione e sigillatela.
2. Posizionate la/le sacca/sacche anticontaminazione contenente il/i campione/i all'interno della confezione originale, quindi posizionate il/i campione/i e tutti i documenti/moduli pertinenti nella busta di reso pagata fornita in dotazione.
3. **Non refrigerate, centrifugate o congelate il/i campione/i.**

Spedizione del(i) Campione(i)

1. Vi preghiamo di consultare il **Foglio di istruzioni "Spedizione del Campione"** all'interno del kit, per le istruzioni su come restituirci i campioni per il test.