


Test allergologico per cani

Istruzioni per la raccolta dei campioni

Importanti note:

- Il proprio cane **NON** deve assumere **antistaminici o farmaci orali a base di steroidi** per un minimo di 48 ore e preferibilmente 14 giorni prima di prelevare il campione.
- Si prega di spedire il campione **lo stesso giorno in cui lo si raccoglie**.
- **NON** si dimentichi di **REGISTRARE** il cane tramite il link fornito nella sua email.
- Si raccolgono i risultati dal proprio account online.

- 1** Posizionare il tubetto con il liquido da parte, ma tenerlo a portata di

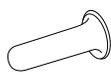

c


Lasciarlo da parte

- 2** Aprire l'OmniSwab dal retro della confezione del tampone. Rimuovere il tampone sterile dalla confezione tenendolo per il manico. Non toccare la punta del tampone.


Sbucciare da qui

Whatman OmniSwab


- 3** Tenere il tampone per il manico (A) con la testa del tampone (B) rivolta lontano da se'. Si può smaltire l'imballaggio.

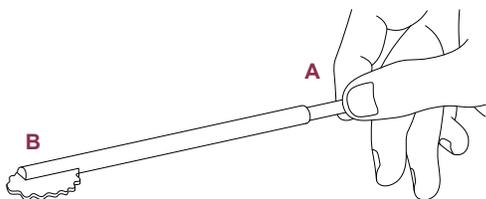

- 4** Tenere saldamente il tampone dal manico (A) e mettere la testa del tampone (B) nella bocca del cane. L'obiettivo è bagnare il più possibile la testa del tampone. Metterlo sotto la lingua, a lato della bocca o all'interno della guancia per 1 minuto e mezzo per ottenere un buon campione. Nota: non è necessario strofinare il tampone, solo immergerlo.

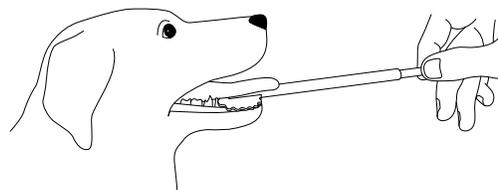

- 5** Aprire con cautela il tubicino con il liquido (C). Tenere l'impugnatura del tampone (A) sull'apertura del tubo. Spingere verso il basso l'estremità dell'impugnatura (A) per espellere la testa del tampone (B) nel tubo (C). Si può gettare il manico dopo che la testina del tampone con il campione del cane è all'interno della provetta.

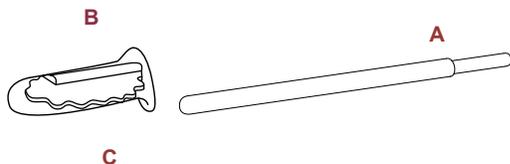

- 6** **PASSO FINALE: Ce l'hai fatta!**

Assicurarsi che la provetta sia **ben chiusa** e agitarla per assicurarsi che il campione sia immerso nel liquido. Posizionare il tubo nella piccola busta protetta dalle bolle. Posizionare la busta con bolle d'aria e il modulo di raccolta del campione all'interno della busta di ritorno. Spedire i campioni del cane tramite raccomandata o corriere. I risultati possono essere scaricati dal proprio account online utilizzando il codice di riferimento del caso in 2-3 settimane dalla ricezione del campione in laboratorio.

